

ANLEITUNG CORONA-SCHNELLTEST

(JOYSBIO Tianjin Biotechnology Co., Ltd. - SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
Colloidal Gold)

Anleitung:

Wie kann ich mich mit dem PoC-Antigen-Schnelltest selbst testen?

<https://www.youtube.com/watch?v=VyCYwy47wt4>


Schritt 1: Vorbereitung

Bevor Sie die Probe entnehmen, müssen Sie die **Hände gründlich waschen** oder desinfizieren – Handschuhe sind bei der selbstständigen Entnahme nicht notwendig. Führen Sie den Abstrich an einem möglichst sauberen Platz durch. Bei der selbstständigen Entnahme kann auch ein Spiegel hilfreich sein.

Benötigtes Material:


1. Extraktionsreagenzglas (Röhrchen),
passender Deckel (Kappe) zum Röhrchen
2. Reagenzienkarte (Testkarte)
3. Stäbchen bzw. Tupfer
4. Pufferlösung
5. Wäscheklammer

Diese Materialien liegen dem Testkit bei.

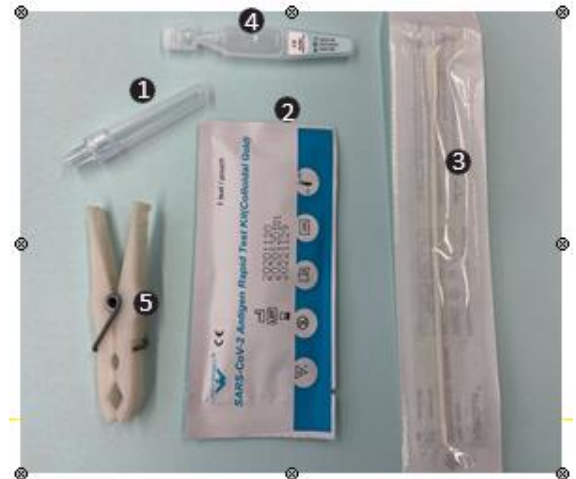

Schritt 2: Pufferlösung einfüllen

Öffnen Sie die Ampulle mit der Pufferlösung und füllen Sie den gesamten Inhalt der Pufferlösung in das Reagenzglas.

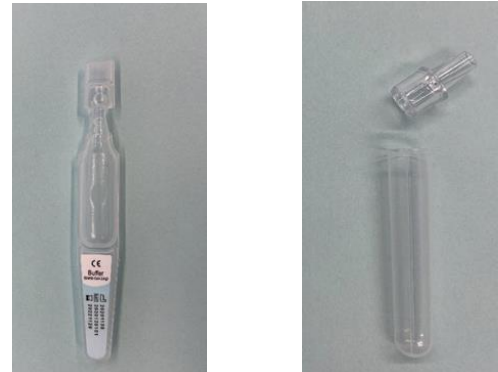

Klemmen Sie die Wäscheklammer unten um das Reagenzglas und stellen Sie das Reagenzglas auf der Wäscheklammer ab.



Schritt 3: Tupfer entnehmen

Öffnen Sie die Verpackung des Stäbchens an der Stelle, an der der Pfeil abgebildet ist und nehmen Sie das Stäbchen am Griff heraus. Dabei den Tupferkopf nicht berühren.

hier öffnen →



Schritt 4: Abstrich entnehmen

Um den Abstrich zu entnehmen, nehmen Sie ggfs. die Maske ab. Neigen Sie den Kopf leicht nach hinten und führen Sie den Tupfer unter sanftem Drehen ca. 2 cm tief in ein Nasenloch ein, bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Drehen Sie den Tupfer anschließend fünfmal hin- und her. Mit dem gleichen Tupfer, direkt im Anschluss, den Vorgang im zweiten Nasenloch wiederholen. Anschließend die Maske wieder aufsetzen und darauf achten, dass Sie den Tupferkopf nicht mehr berühren.

Schritt 5: Tupfer im Röhrchen schwenken

Führen Sie den Tupfer in das Röhrchen, bis der Tupferkopf den Boden des Reagenzglases berührt. Drehen Sie den Tupfer etwa 20 Sekunden lang im Reagenzglas ohne Flüssigkeit zu verschütten.

Schritt 6: Tupfer ausdrücken

Heben Sie den Tupfer anschließend im Röhrchen wieder etwas hoch und drücken Sie das Röhrchen auf Höhe des Tupferkopfes zusammen, um den Tupfer möglichst vollständig auszudrücken. Ziehen Sie den Tupfer wieder aus dem Röhrchen und stecken Sie ihn direkt in einen wasserundurchlässigen Müllbeutel oder kopfüber zurück in die Verpackung.

Schließen Sie anschließend die Kappe des Reagenzglases und drücken Sie sie fest auf das Röhrchen, es ist kein Einfädeln oder Verdrehen nötig.

Schritt 7: Mischen der Flüssigkeit

Mischen Sie die Flüssigkeit im Reagenzglas gründlich, indem Sie an den Boden des Reagenzglases schnippen oder das Röhrchen mehrmals leicht zusammendrücken. Klemmen Sie die Wäscheklammer wieder unten um das Reagenzglas und stellen Sie es auf der Wäscheklammer ab.

Schritt 8: Öffnen der Reagenzienkarte

Reißen Sie den Aluminiumfolienbeutel der Reagenzienkarte auf. Nehmen Sie die Testkarte heraus und legen Sie sie auf eine saubere flache Oberfläche.

Schritt 9: Flüssigkeit auf Reagenzienkarte geben

Drehen Sie das Reagenzglas über dem Probenloch der Testkarte auf den Kopf und drücken Sie das Reagenzglas zusammen, so dass genau drei Tropfen der Probenlösung in das Probenloch der Testkarte fallen.

Beobachten Sie das Ergebnis der Testkarte 15-20 Minuten lang aber nicht länger und bewegen Sie die Testkarte nicht. Nach 20 Minuten ist das Ergebnis ungültig.

Auswertung des Tests:

Auf der Testkarte befinden sich zwei Markierungen, an denen nach durchgeführtem Test Striche sichtbar werden können. Der Bereich C liefert die Qualitätskontrolllinie, der Bereich T die Testlinie.

(C=Qualitätskontrolllinie, T=Testlinie)



Strich nur bei C

Test ist negativ

Achtung: Kein sicherer Ausschluss einer Infektion



Striche bei C&T

Test ist positiv

weiter zu Anlage 1 „Verfahren bei positivem Schnelltest“



Strich nur bei T

Test ist ungültig

neuen Test von vorne durchführen



Keine Striche

Test ist ungültig

neuen Test von vorne durchführen

Alle benutzten Testutensilien (außer die Wäscheklammer) geben Sie im Anschluss bitte in den hierfür vorgesehenen Mülleimer.

Reinigen Sie die Wäscheklammer mit Seife unter fließendem Wasser. Waschen Sie Ihre Hände gründlich, lüften Sie den Raum und säubern Sie die Unterlage.